

ストーマライフを快適に！

ミムロ入浴用パウチ保護フィルムライト

こんな事でお困りではないですか？

パウチが濡れてしまって不安…
入浴時にテープを貼るのが煩わしい…
テープを貼ると破れてしまう…
安心してのんびり湯船に浸かりたい…

-light-

その悩み解決いたします！

★パウチの種類を問わず簡単に覆い隠すことができます。
パウチにくっつきにくいPVCフィルムシートを使用。



ガーゼ5枚入




ガーゼ使用

お得な20枚入り！半透明タイプ

装具の上から簡単に貼れます。手軽に装具が濡れるのを防ぎます。サイズは使いやすいタテ20cm×ヨコ20cm、厚みは60ミクロン。たっぷり使えて、1枚140円！

※ウェットティッシュなどで貼る部分の肌をきれいに拭いてからご使用頂くと密着力が強くなります。

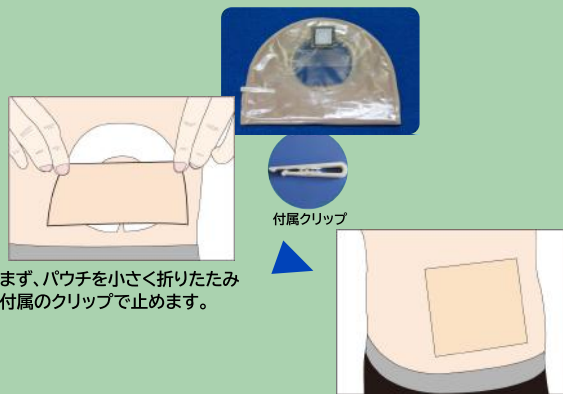

まず、パウチを小さく折りたたみ付属のクリップで止めます。

次に、シートの中央にパウチがくるように貼り付けて完了。

ご使用上の注意

- ご使用の際はなるべくしわが寄らないように貼って下さい。貼り方によっては浸水してしまう場合がございます。
- パウチの中の空気がふくらむ場合がございますが、そのまま入浴下さい。無理に上から押さえると浸水してしまう恐れがあります。
- 本品は使い捨て製品となっております。
- ストーマ装具を使用せずに本製品単体での入浴時のご使用はおやめ下さい。
- パウチの状態によっては、剥がした時にパウチの破損等が起こる恐れがあります。
- 本品は給付金の対象にならない場合があります。
- 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみなどの皮膚症状が現れた場合にはただちに使用を中止し医師の診察を受けて下さい。

商品名	ミムロ入浴用パウチ保護フィルム-ライト-
仕様	半透明タイプ
商品コード	400
サイズ	20cm×20cm 60ミクロン
商品容量	20枚入(ガーゼ5枚付)
定価	3,300円(税込価格)

製造元



株式会社 **ミムロ**



4 580454 852807

〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波1-13-16
TEL 043-307-5020(代) FAX 043-307-5028
ホームページ <https://www.stoma-belt.jp/>
Eメール info@mimuro.jp

販売代理店